


Su profesional sanitario le ha prescrito el sistema compresivo UrgoK2

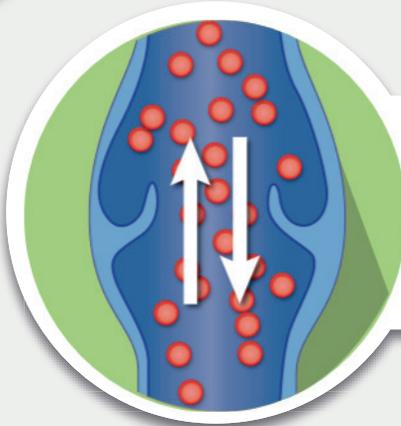

¿Por qué compresión?

Usted sufre **Insuficiencia Venosa Crónica con una herida en pierna**. La compresión es el tratamiento recomendado, **sin ella su herida tardará más en curar**.

¿Por qué UrgoK2?

UrgoK2 es un sistema compresivo recomendado por las guías sanitarias por su óptima presión, para **lograr la cura de su herida**.



¿Qué puedo esperar de UrgoK2?

Los primeros días puede ser molesto, pero **estas molestias disminuyen rápidamente, igual que el tamaño de su herida** con el uso continuo del **vendaje UrgoK2**.

¿Cómo puedo aliviar las molestias?




Para disminuir la **sensación de presión del vendaje**, en reposo, descanse con los pies en alto, y realice movimientos circulares y de arriba abajo con sus pies.



Para aliviar la **sensación de picor en las piernas**, realice suaves masajes en la pierna por encima del vendaje.

En el cambio de vendaje solicite que le apliquen abundante crema hidratante.

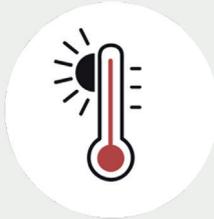

Para disminuir la **sensación de calor** puede aplicar frío sobre el vendaje (sin humedecer la venda).

Es importante que **NO** retire su vendaje

Si considera que necesita realizar el cambio del vendaje antes de la próxima cura, o presenta molestias distintas a las indicadas, póngase en contacto con su profesional sanitario.

Nombre Profesional Sanitario: _____

Fecha / hora próxima cura: _____