

UrgoK2

RECOMENDADO PELO NÍVEL MAIS ALTO DE EVIDÊNCIA



#COMURGOCATRIZA

URGO
MEDICAL
Healing people®

UrgoK2

DIRETRIZES INTERNACIONAIS RECOMENDAM O USO DE BANDAGEM MULTICOMPONENTE EM VEZ DE BANDAGEM MONOCOMPONENTE

REVISÃO COCHRANE



RECOMENDAÇÃO:

- A compressão aumenta as taxas de cicatrização de úlceras venosas em comparação ao sistema sem compressão.
- Sistema multicomponente é mais eficaz que sistema de componente único.
- Sistemas multicomponentes contendo uma bandagem elástica - longo estiramento - demonstram ser mais eficazes do que aqueles compostos por componentes inelásticos

Resumo EWMA

A compressão deve ser aplicada por meio de um sistema multicomponente, que aumenta a pressão e rigidez, em vez de bandagens de componente único.



ESTUDO ODYSSEY

OBJETIVO

Para avaliar a eficácia, tolerância e aceitabilidade de sistemas de compressão de duas camadas na etiologia tratamento de úlceras venosas nas pernas

PROJETO

Randomizado, aberto, controlado não inferior em dois grupos paralelos

TRATAMENTO

187 pacientes: UrgoK2 (n=94); Profore (n=93)

INDICAÇÃO

Úlcera de perna, predominantemente de origem venosa (ABPI >0,8)

DESFECHO

Fechamento completo da ferida ao final do período de acompanhamento de 12 semanas

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

37 centros na França, Reino Unido e Alemanha

DURAÇÃO

12 semanas

CONCLUSÃO


- **O sistema multicomponente UrgoK2 é mais eficaz que o Profore (sistema multicamada)** no que diz respeito ao gerenciamento de VLU.
- **UrgoK2** é considerado:
 - Mais fácil de aplicar que o Profore
 - Confortável durante o dia e a noite

HIPÓTESE DE NÃO INFERIORIDADE DO URGOK2 X PROFORE


URGOK2, UM SISTEMA DE 2 BANDAGENS MULTICOMPONENTE, É TÃO EFICAZ QUANTO UM SISTEMA DE BANDAGEM DE 4 CAMADAS

- Mais lesões fechadas na 12ª semana x com Profore
- Mais lesões reduzidas > 40% x com Profore

% de fechamento completo da lesão na S12 (ITT)

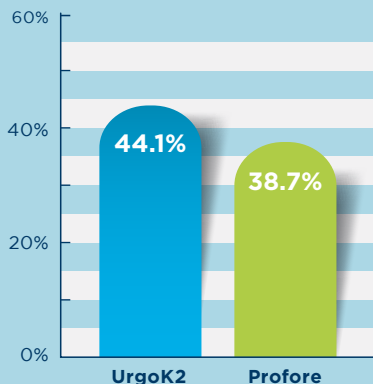


Superfície da área da lesão > 40% na S4

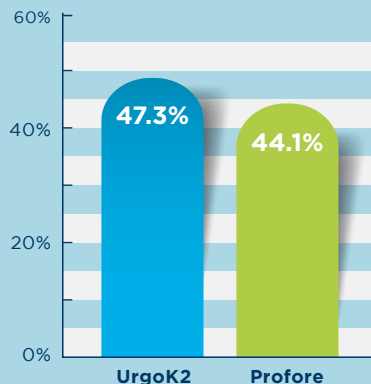

URGOK2 É MAIS FÁCIL DE APLICAR

- UrgoK2 é mais fácil de aplicar desde a primeira aplicação em comparação com Profore®
- Diferença significativa entre os dois grupos: $p=0,035$

Facilidade na primeira aplicação (n/%)

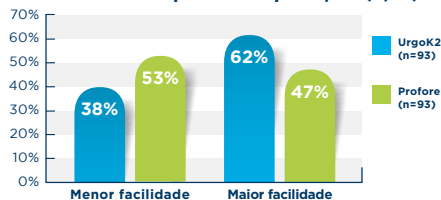

ESTUDO JUNGER

OBJETIVO

Comparação das pressões e aceitabilidade de três sistemas de compressão ao longo de um período de 7 dias **(Multicomponente x Multicamadas x Monocomponente)**

PROJETO

Randomizado, aberto, controlado, unicêntrico

TRATAMENTO

24 pacientes: **UrgoK2** (2CB), Profore (4CB) e Actico (SSB)

INDICAÇÃO

Voluntários saudáveis com pele intacta

PRIMEIRO DESFECHO

Medição da pressão da interface em D1, D3 e D7, em posição supina, sentada e em pé ativo

CONCLUSÃO

- ✓ **UrgoK2** manteve uma pressão de sub-bandagem equivalente ao Profore após 7 dias (25% do Profore interromperam a avaliação após 3 dias devido à dor e desconforto)
- ✓ **UrgoK2** foi considerado o mais confortável dos 3 sistemas de compressão

JUNGER

URGOK2 FORNECE PRESSÃO SUSTENTADA E PERMANECE NO LOCAL POR ATÉ 7 DIAS

- Após 7 dias, **UrgoK2** manteve uma pressão terapêutica eficaz (40mmHg) nas posições supina, sentada e em pé
- A perda da pressão máxima de trabalho foi significativamente menor para o sistema de duas camadas em comparação a bandagem de curto estiramento

URGOK2 REDUZ EFICAZMENTE O EDEMA

- Todos os sistemas de compressão alcançaram uma redução significativa no volume da parte inferior da perna no dia 7.
- No entanto o **UrgoK2** resultou em maior perda de volume do que o SSB (Actico) e nenhuma diferença foi observada entre a 2ª camada (**UrgoKTwo**) e bandagens de quatro camadas (Profore).

URGOK2 (MULTICOMPONENTE) É MELHOR TOLERADO E MAIS CONFORTÁVEL QUE PROFORE E ACTICO (MULTICAMADA E MONOCOMPONENTE)

- Em relação à segurança e conforto, todos os critérios avaliados mostram uma maior aceitabilidade do sistema **UrgoK2**, resultando em melhor conformidade de dia e noite
- **25% dos voluntários que usavam o 4LB interromperam o teste** no terceiro dia, o que pode ser explicado pela alta pressão em todas as posições

ESTUDO BENIGNI

OBJETIVO

Avaliação da eficácia, segurança e aceitabilidade do **UrgoK2** para úlceras venosas de perna

PROJETO

Aberto, não comparativo, multicêntrico

TRATAMENTO

42 pacientes, acompanhamento de 6 semanas

INDICAÇÃO

Pacientes com Úlcera Venosa de Perna (ABPI = 1,0 + 0,1), já tratados com multicomponentes sem melhora clínica

PRIMEIRO DESFECHO

Redução da área de superfície da ferida

SEGUNDO DESFECHO


Controle do edema nas pernas, conforto do paciente

CONCLUSÃO

- **UrgoK2** demonstra eficácia comprovada na cicatrização de feridas
- **UrgoK2** reduz efetivamente o edema
- **UrgoK2** é considerado confortável
- Em comparação com a terapia de compressão utilizada anteriormente, os pacientes relataram maior conforto, refletido pela total concordância com **UrgoK2**

BENIGNI

URGOK2 DEMONSTRA EFICÁCIA COMPROVADA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

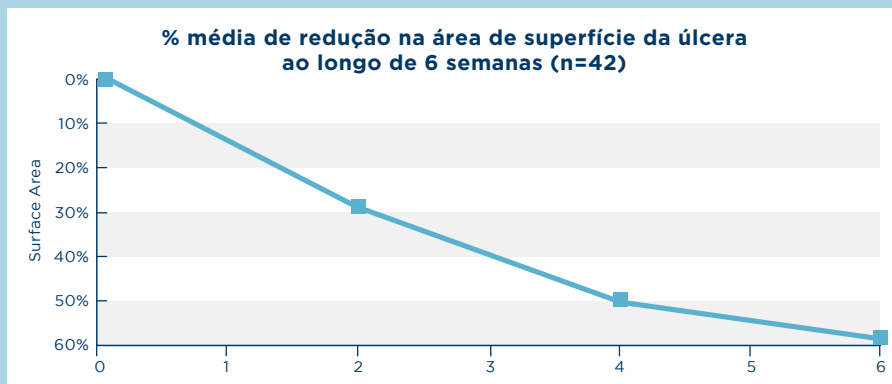

86%

**PACIENTES MELHORADOS
OU CICATRIZADOS
DEPOIS DE 6 SEMANAS
DE TRATAMENTO**

58.5%

**MÉDIA DA ÁREA
DE SUPERFÍCIE
REDUZIU APÓS
6 SEMANAS**

- Mais de 75% das úlceras venosas no estudo apresentaram uma redução de 40% ou mais da sua área de superfície inicial num tempo médio de 18,8 dias.

Isto é altamente preditivo de cicatrização completa em 20-24 semanas.

ESTUDO BENIGNI

URGOK2 REDUZ EFICAZMENTE O EDEMA



- Houve uma redução geral no edema de 83%.
- Apenas 12% dos pacientes ainda apresentavam edema em comparação com 69% dos pacientes no início do estudo.

BENIGNI

URGOK2 É ALTAMENTE CONFORTÁVEL PARA OS PACIENTES, DIA E NOITE



95%

Achou confortável
durante o dia

92%

Achou confortável
durante a noite



OS PACIENTES REALMENTE ACHAM QUE O URGOK2 É CONFORTÁVEL?

AO LONGO DO ESTUDO:

59%

Não sentiu coceira

65%

Não sentiu calor

84%

Achou fácil ou muito
fácil usar sapatos

ESTUDO HANNA

OBJETIVO

Avaliação do nível de pressão aplicada por **UrgoK2** e dois outros sistemas de compressão (um 4LB: Profore e um SSB: Actico) em membro inferior por um grupo de profissionais de saúde

PROJETO

32 enfermeiros de 4 áreas diferentes na Inglaterra com experiência regular em sistemas de bandagens compressivas para úlcera venosa

DESFECHOS

Cada enfermeira aplicou os 3 sistemas na mesma voluntária

- Avaliação do nível de pressão da interface aplicado pelos três sistemas de compressão
- Medição do tempo necessário para aplicação das bandagens
- Avaliar a aceitabilidade das 3 sistemas


CONCLUSÃO

- **UrgoK2** é fácil, consistente e preciso de aplicar
- 85% dos enfermeiros aplicaram a pressão terapêutica recomendada com **UrgoK2** em sua primeira aplicação
- **UrgoK2** foi classificado como mais confortável do que Actico e Profore

HANNA

PRECISÃO DA APLICAÇÃO

- **85%** aplicaram pressão terapêutica correta (30-50 mmHg) com **UrgoK2** em sua primeira aplicação
- **25%** dos enfermeiros aplicaram alta pressão (>50mmHg) com Profore
- **75%** aplicados como subterapêuticos pressões (<30mmHg) com Actico
- **97%** dos enfermeiros consideraram os marcadores de pressão (PressSure System) do UrgoK2 útil ou muito útil

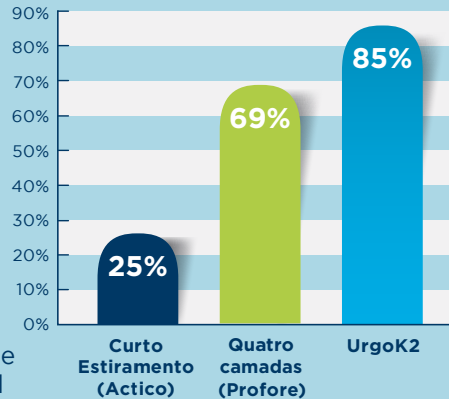

TEMPO DE APLICAÇÃO

Embora o sistema de curto estiramento tenha sido aplicado mais rápido que o Urgo K2 e multicamadas, 75% de enfermeiras aplicaram a pressão terapêutica não recomendada (<30mmHg)



URGOK2 É CLASSIFICADO COMO MAIS CONFORTÁVEL QUE OS CONCORRENTES

	UrgoK2	Profore	Actico
Fácil de usar	63%	47%	22%
Menor volume	72%	3%	47%
Conforto	69%	13%	31%
Conformidade esperada	63%	13%	31%
Capacidade esperada de permanecer no lugar	56%	56%	25%

UrgoK2 foi avaliado mais confortável do que Actico (SSB) e Profore (4LB) pelos médicos

UrgoK2 foi classificado como o mais bem avaliado em termos de “concordância esperada do paciente” por médicos



ESTUDO NEW 2023

OBJETIVO

Estimar a taxa de cicatrização da UV com sistema de compressão (bandagem multicomponente x bandagem de curto estiramento). Estimar o tempo de cicatrização e os custos do tratamento.

PROJETO

Este estudo observacional, comparativo retrospectivo
(Nível de evidência 2b)

TRATAMENTO

Banco de dados de 25.255 pacientes entre os anos 2018-2020
Acompanhamento no período de 6 meses.

PRIMEIRO DESFECHO

Redução do tempo de tratamento.

SEGUNDO DESFECHO

Redução dos custos assistenciais e operacionais.

TERCEIRO DESFECHO


Em todos os pontos as taxas de cicatrização de feridas foram mais altas no grupo com Bandagem Multicomponente. Após 3 meses de tratamento, uma redução de área 42% com Bandagem Multicomponente e 35% com bandagem de curto estiramento.

CONCLUSÃO


- **Com UrgoK2** houve redução média de 3 semanas no tratamento, quando comparado a terapia de curto estiramento.
- **Com UrgoK2** reduz de 20% dos custos totais. Representando menos hospitalização, menos tempo da equipe de enfermagem e menos custos com curativos.

NEW 2023

**TRATAMENTO DAS ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA COM TERAPIA COMPRESSIVA:
RESULTADOS NA VIDA REAL COM DOIS PROCEDIMENTOS DIFERENTES
(COMPARATIVO ENTRE BANDAGENS MULTICOMPONENTE
E BANDAGEM DE CURTO ESTIRAMENTO)**

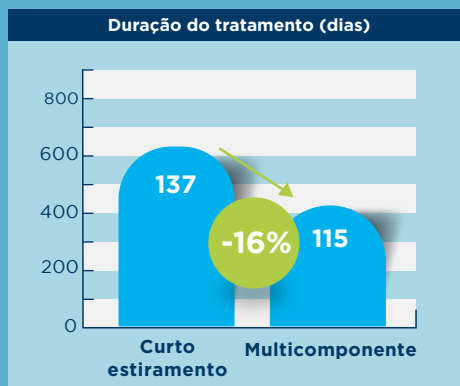

- Redução média de 3 semanas no tratamento com UrgoK2, quando comparado a terapia de curto estiramento (Rosidal K)
- Quando comparado a literatura, o UrgoK2 reduz o tempo de tratamento em média de 12 semanas (3 meses)

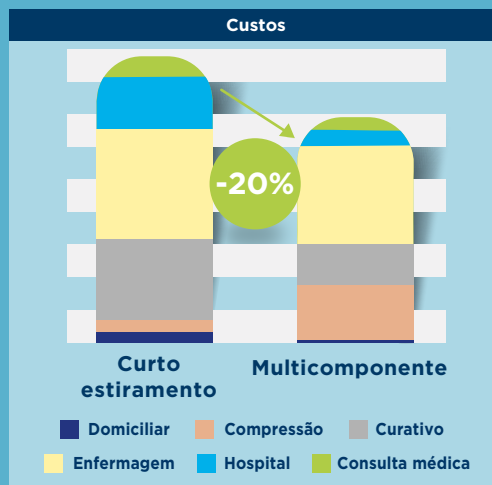


MENOS hospitalização



MENOS tempo da enfermagem



MENOS custo com curativos

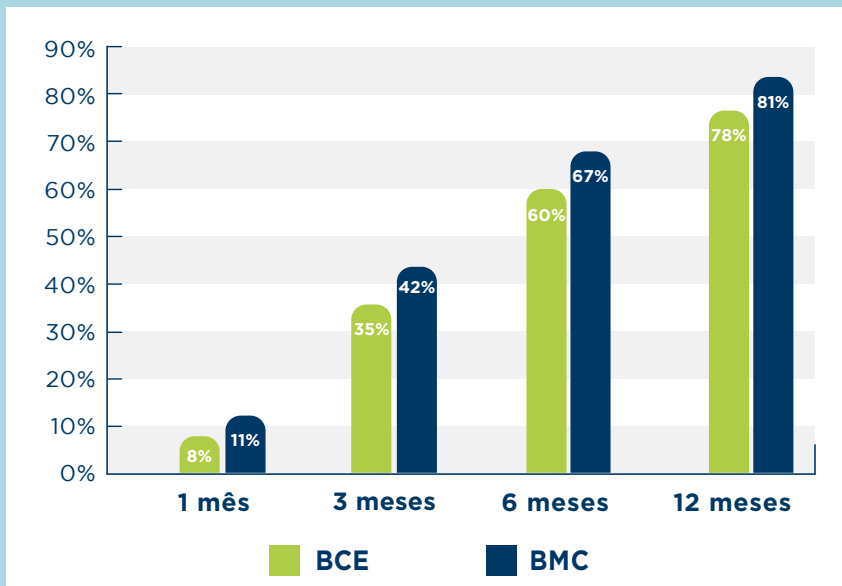

- Em todas os pontos as taxas de cicatrização de feridas foram **mais altas no grupo com Bandagem Multicomponente UrgoK2.**
- Após 3 meses de tratamento um WCR **42% com Bandagem Multicomponente UrgoK2** e 35% com bandagem de curto estiramento.



EUK012024

UrgoK2

URGO
MEDICAL
Healing people®