


CONFIANÇA NO TRATAMENTO É O PRIMEIRO PASSO PARA A CICATRIZAÇÃO. COM **UrgoK2** VOCÊ ESTÁ NO CAMINHO CERTO!

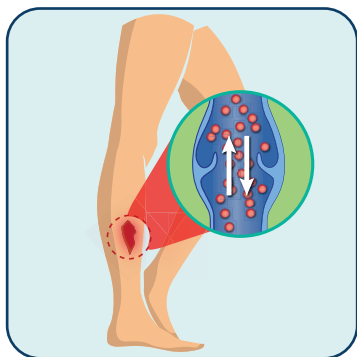

CAUSA

Incapacidade das veias levarem o sangue de volta ao coração. As válvulas das veias estão afastadas causando o acúmulo do sangue nas pernas.

CONSEQUÊNCIA


O retorno venoso não acontece e o sangue fica acumulado nas pernas, causando: edema, sensação de peso nas pernas, fadiga, coceira, dor, pele ressecada, impacto na mobilidade e a lesão: **Úlcera Venosa**.



COMPRIMIR É A SOLUÇÃO

Para que o sangue acumulado retorne ao coração, é necessário utilizar uma compressão adequada.

Com a compressão contínua do **UrgoK2** é possível cicatrizar a lesão e melhorar os seus sintomas.

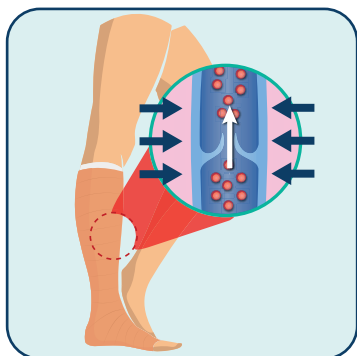

RESULTADO NO TRATAMENTO

As veias voltam a funcionar normalmente pois as válvulas se aproximam, corrigindo o fluxo sanguíneo.

Isso irá melhorar o seu dia a dia:

+ CONFORTO + MOBILIDADE
- DOR = CICATRIZAÇÃO!

COMO POSSO ALIVIAR OS SINTOMAS?

Nos primeiros dias de tratamento, é normal sentir algum desconforto. Isso acontece porque a compressão está começando a corrigir o problema nas veias. Fique tranquilo! Esses sintomas geralmente melhoram rápido à medida que a lesão cicatriza.



Para **aliviar a sensação de pressão da bandagem**:

- Eleve as pernas;
- Faça movimentos circulares e de cima para baixo com os pés.



Para **aliviar a sensação de coceira nas pernas**, faça massagens suaves sobre a perna, por cima da bandagem.



Recomendamos a hidratação da pele íntegra entre as trocas das bandagens compressivas.



Para **garantir uma melhor mobilidade**, use um calçado adequado.



Durante o banho, use uma proteção para evitar que o **UrgoK2** molhe.



Para **otimizar o seu tratamento**, procure ter hábito de vida saudável, como prática de atividade física e boa alimentação.

PRÓXIMOS RETORNOS

DATA	HORA



É importante que você NÃO retire a bandagem e retorne conforme agendado pelo seu profissional de saúde.