

História clínica do paciente

- Comorbidades
- Estilo de vida e fatores de risco
- Histórico vascular e familiar
- Recidiva de Úlcera



Principais características da Úlcera Venosa

- **Localização:** acima do maléolo.
- **Dor:** pode apresentar dor que alivia com a elevação dos membros.
- **Aspecto da pele:** eczema, atrofia branca, formato da perna irregular, quente ao toque.
- **Edema:** generalizado e piora ao longo do dia.
- **Leito da Lesão:** raso com margens irregulares.
- **Exsudato:** grande quantidade.
- **Pulso:** presente.
- **Evolução:** lenta ou estagnada.



Se apresentar características de Úlcera Venosa:

Realizar a Palpação dos Pulsos Distais:



Pedioso



Tibial Posterior



Pulso Presente?

SIM

Úlcera Venosa ✓

NÃO

Encaminhar para Especialista

URGO
MEDICAL
Healing people®

Até 100% das lesões crônicas apresentam biofilme, que pode se reformular em até 24 horas após o desbridamento.¹

A SOLUÇÃO IDEAL É:

**DESBRIDAR E
MANter LIMPO**




TLC-Ag

- Fornece eficácia antimicrobiana rápida e de amplo espectro.²
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.³
- Permite a retirada atraumática e sem dor.⁴



Fibras Magnéticas™

- A atração eletrostática entre as fibras magnéticas e os componentes do leito da lesão permite a remoção contínua de esfacelos, debris e biofilme.
- Esse processo ocorre devido à diferença de cargas, com o curativo carregado negativamente e a lesão, positivamente.

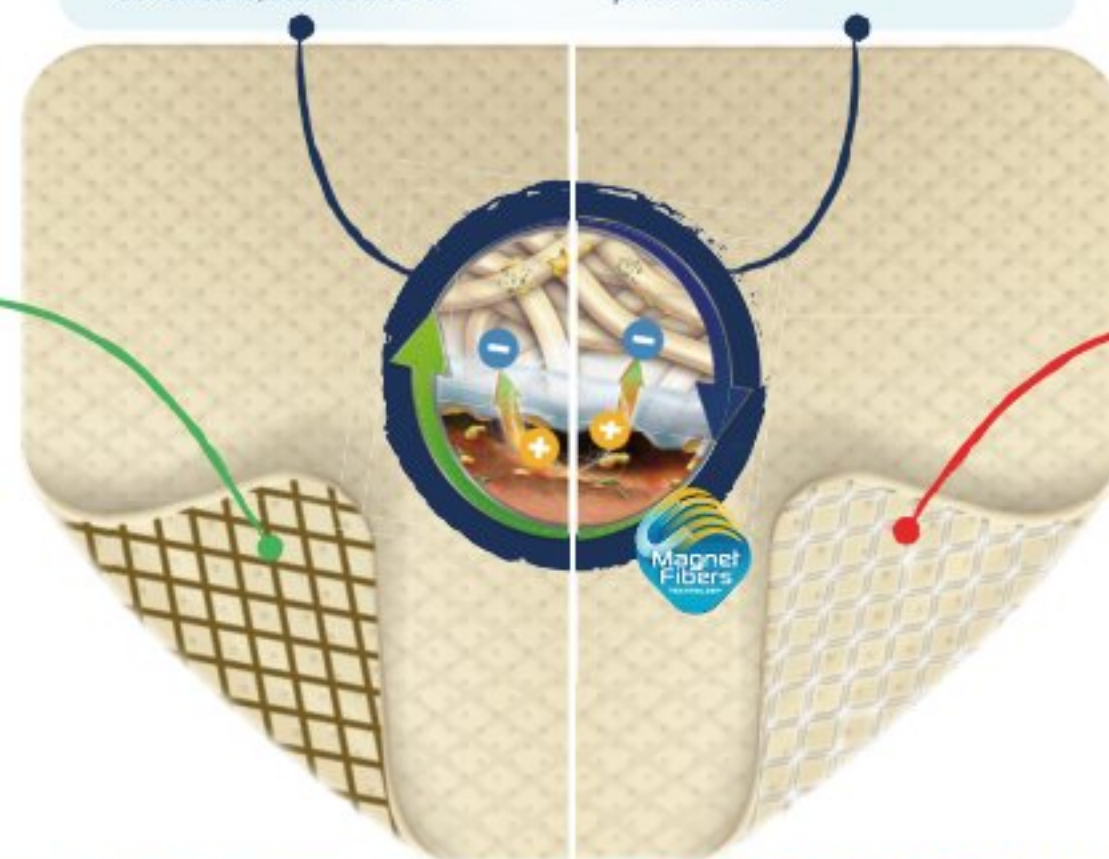

A SOLUÇÃO IDEAL É:

**MANter LIMPO
E ACELERAR A
CICATRIZAÇÃO**



TLC-Nosf

- Equilibra os níveis elevados de Metaloproteases (MMPs), enzimas que, em excesso, degradam a matriz extracelular, acelerando a cicatrização em até 50%.⁵
- Proporciona um meio úmido ideal e sustentado.
- Permite a retirada atraumática e sem dor.

Do controle antimicrobiano

Até a cicatrização completa

1. Schmidt G, et al (2017). Consensus guidelines for the identification and treatment of biofilms in chronic non-healing wounds. Wound Rep and Reg. 25: 744-757. 2. Desroche M, Dinger C, Zander P, et al. Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilms with a dressing combining polydisperse fibers and a silver matrix. J Wound Care. 2016; 26: 571-584. 3. Daler S, Sigal L, Aboela K, et al. Biocompatibility of a dressing with polydisperse fibers and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non-comparative trial. J Wound Care. 2016; 26: 585-595. 4. Internal report Laboratories Urgo/URGO/2017-04-03/04. Read the leaflet carefully before use. 7/2014

5. Hoyer K, Pichler K, Gassner G, Augustin M. Epidemiology and use of compression treatment in venous leg ulcers: nationwide cohort data analysis in Germany. BMC Wound Care. 2017; 27: 142. 6. Pichler K, Augustin M, Seret A, Barthol 2-2. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-Nosf wound dressings. J of Wound Care. 2017 Feb; 30 Suppl154-545. Circumfer 2 Wound Care. 2017 Mar; 3: 2632-3633.

Mais de 80% dos pacientes com úlcera venosa não usam compressão adequada, prolongando o impacto na vida dessas pessoas.⁷ O cenário se agrava ainda mais com as altas taxas de recidiva: 30% no primeiro ano e até 78% no segundo.⁸

Sem compressão, a cicatrização não se sustenta!

A SOLUÇÃO IDEAL É:

COMPRIMIR O TEMPO TODO

Compressão Multicomponente de forma Contínua, Consistente e Confortável.



18 - 25 cm (50%)



25 - 32 cm (75%)



Com duas opções de tamanho, **UrgoK2** assegura a sobreposição correta das bandagens, essencial para manter a pressão terapêutica adequada.



COMPRESSÃO CONTÍNUA

Eficácia que se comprova: 86% dos pacientes melhoraram ou cicatrizaram em 6 semanas, com 58,5% de redução média na área da ferida.

- Pressão contínua e sustentada - 24h/7, esteja o paciente em repouso ou ativo.
- Sem escorregamento da bandagem durante o tratamento.



COMPRESSÃO E APLICAÇÃO CONSISTENTE

Tenha confiança na sobreposição da bandagem através do marcador de pressão - PressSure System.

- 97% dos enfermeiros consideraram o marcador de pressão útil ou muito útil.
- 85% dos profissionais aplicaram pressão correta na primeira aplicação.



COMPRESSÃO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE

O **UrgoK2** é altamente confortável para os paciente. 95% dia e 92% noite.

- **UrgoK2** foi classificado como o sistema mais confortável em comparação a outros multicamadas e curto estiramentos.
- **UrgoK2** foi classificado como o mais bem avaliado em termos de "adesão do paciente" por médicos.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA



APLIQUE O UrgoK2



Compressiongo
Acesse o portal e tire suas dúvidas

- Faça a orientação sobre o uso do calçado adequado e exercício físico.
- O **UrgoK2** não pode ser molhado e deverá ser protegido durante o banho.

#COMURGOCICATRIZA

URGO
MEDICAL
Healing people®

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA ÚLCERA VENOSA



URGO
MEDICAL
Healing people®